



# ЛЕЛЛА

Трехрежимный компрессорный  
ингалятор (небулайзер)  
Произведено в Италии  
Гарантия 5 лет



**Трехрежимный компрессорный ингалятор (небулайзер) ЛЕЛЛА** производства фирмы «Флаем Нуова» (Италия) комплектуется двумя типами распылителей («Рапидфлаем 2» и «RF6 Basic<sup>2</sup>»). Рекомендуется для профилактического и лечебного использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

## ЛЕЛЛА

## ЛЕЛЛА

Предназначен для проведения небулайзерной аэрозольтерапии и ирригации полости носа; применяется при лечении острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей:

- фарингита, ларингита
- риносинусита, трахеита
- бронхита, бронхиальной астмы
- пневмонии, туберкулеза легких
- хронических обструктивных заболеваний легких
- послеоперационной дыхательной недостаточности

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание - 220/230 В ~50 Гц
- Мощность - 140 ВА
- Максимальное давление воздуха - 2,5 бар
- Расход воздуха - 10 л/мин
- Режим работы и размер частиц аэрозоля:  
режим 1 - 0,8-2,0 мкм, (распылитель «Рапидфлаем 2»)  
режим 2 - 2,0-10,0 мкм, (распылитель «Рапидфлаем 2»)  
режим 3 - 3,6 мкм, (распылитель «RF6 Basic<sup>2</sup>»)
- Время непрерывной работы - 60 мин
- Габаритные размеры - 21 x 16 x 13 см
- Вес - 1,6 кг

- Расход лекарства при работе распылителей в непрерывном режиме:  
режим 1 - 0,25 мл/мин.  
режим 2 - 0,51 мл/мин.  
режим 3 - 0,32; 0,42 мл/мин.

## ИРРИГАТОР НОСОВОЙ:

- Максимальная ёмкость - 10 мл
- Размер частиц аэрозоля - 48 мкм
- Время распыления - 10 мл раствора - 20 мин

Зарегистрирован в Минздраве РФ и сертифицирован



## Краткая инструкция по применению ингалятора (небулайзера) ЛЕЛЛА

### Принадлежности к ингалятору ЛЕЛЛА Распылитель «Рапидфлаем 2»



### Ирригатор носовой «Rhino Clear»



Наличие съемной верхней заглушки (AA) позволяет изменять скорость потока аэрозоля.

### Распылитель «RF6 Basic<sup>2</sup>»



**Эксклюзивный дистрибутор в России ООО «Интер-Этон».**

Россия, 105005, Москва, ул. Бауманская 56/17, стр. 1

Розничная продажа, справки:

Тел.: (499) 261-85-32

Оптовая продажа: Тел.: (499) 261-78-70

Факс: (499) 261-79-84

e-mail: inter-eton@mtu-net.ru

internet: http://www.inter-eton.ru



Порядок работы с распылителями «Рапидфлаем 2», «RF6 Basic<sup>2</sup>» и принадлежностями одинаков за исключением пункта «ж» настоящей инструкции.

**Сборку производить при выключенном аппарате.**

а - откройте колбу для распыления лекарств (распылитель) путем поворота ее верхней части (1) вокруг собственной оси против часовой стрелки.

б - залейте по делениям необходимое количество лекарства в нижнюю часть колбы (2). Одно деление - 1 мл.

в - закройте колбу путем поворота ее части (1) вокруг собственной оси по часовой стрелке.

г - подсоедините распылитель к штуцеру аппарата при помощи трубы (3).

д - установите экономайзер (8), если это необходимо. Экономайзер используется для экономии лекарственного препарата.

В случае применения экономайзера пациент пальцем закрывает в нем отверстие «С» при вдохе и открывает при выдохе.

е - к боковому отверстию в верхней части колбы подсоедините желаемые принадлежности: маски (4) или (10), загубники для вдыхания ртом (7) и (11), наконечники носовые (5), (6), (12 - подсоединяется через загубник 11).

ж - при применении распылителя «Рапидфлаем 2» используется заглушка «А» в верхней части колбы для выбора необходимой дисперсности облака аэрозоля.

Если отверстие «В» в верхней части колбы закрыто заглушкой «А» (режим 1), дисперсность аэрозоля - от 0,8 до 2,0 мкм, что обеспечивает ингаляцию нижних дыхательных путей. Если отверстие «В» открыто (режим 2), то дисперсность аэрозоля составляет 2,0 - 10,0 мкм, и этот режим используется для ингаляции верхних дыхательных путей.

з - включите ингалятор.

и - по окончании процедуры промойте принадлежности под струей воды и дезинфицируйте моющим средством.

к - для очистки полости носа и отсасывания скопившейся слизи снимите с ирригатора носовые насадки (13) и сепаратор (14), влейте раствор (до 10 мл) в камеру ирригатора (16) с вставленной форсункой (15).

Установите сепаратор, проверив выравнивание стрелок корпуса ирригатора и сепаратора. Поставьте на сепаратор (14) наиболее подходящую размеру ноздрей носовую насадку (13): прозрачная рекомендуется для детей до 3 лет, белая - от 3 до 12 лет, голубая - от 12 лет и старше.

Подсоедините ирригатор через соединитель (20) к штуцеру ингалятора трубкой (3). Включите ингалятор.

Приблизьте ирригатор к носу, приставив отверстие носовой насадки к одной ноздре, закрыв вторую ноздрю пальцем. Включите ирригацию, держа нажатой кнопку (19) во время вдоха.

Один раз в 2-3 месяца необходимо обрабатывать воздушный фильтр, расположенный рядом со штуцером ингалятора, к которому подсоединяется трубка соединительная (3), моющим средством с последующей промывкой в чистой проточной воде. Фильтр перед установкой в ингалятор сушить не менее 2 часов при комнатной температуре.

Максимальное время работы ингалятора без выключения - 60 минут, после 20-минутного перерыва он снова готов к работе.

### ВНИМАНИЕ!

Возможна поставка дополнительного количества принадлежностей.

**Гарантийное (5 лет) и сервисное обслуживание.**