

# Гигиена и уход за устройством PARI O-PEP



## Подготовка

- Разберите PARI-O-PEP
- Выньте металлический шарик из воронки
- Снимите ремешок с нижней части прибора



## Очистка

- Промойте проточной водой с небольшим количеством моющего средства
- Тщательно прополощите в проточной воде



## Дезинфекция

- Прокипятите в достаточном количестве кипящей воды покрывающей все части устройства в течение 5 мин
- или**
- В термодезинфекторе для стерилизации бутылочек для детского питания не менее 6 мин



## Сушка

- Поместите компоненты на чистую сухую неволокнистую салфетку и оставьте для просушивания

## или

- Используйте для просушивания бытовой фен



## Хранение

- После высушивания соберите прибор и храните его в сумке



# PARI O-PEP

Осциллирующее положительное давление на выдохе

Эффективная терапия по очистке дыхательных путей посредством удаления бронхиального секрета



PARI O-PEP

## Советы по применению и гигиена

[www.pari.de](http://www.pari.de)  
[www.pari.com.ru](http://www.pari.com.ru)

PARI Сервисный центр...

+7 495 981 88 60

Звоните нам...

ООО "ПАРИ синергия в медицине"

117418 Москва, а/я 16

тел/факс: +7 495 981 88 60

+7 499 128 98 27

[pari-synergy@mail.ru](mailto:pari-synergy@mail.ru), [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

[www.pari.com.ru](http://www.pari.com.ru), [www.pari.de](http://www.pari.de)

Специалисты в эффективной ингаляции



Специалисты в эффективной ингаляции



# **PARI O-PEP** приспособление для мобилизации бронхиального секрета и очищения дыхательных путей

Применяется для улучшения отхождения мокроты при острых и хронических заболеваниях нижних отделов дыхательных путей, при таких заболеваниях как:

- бронхиальная астма, • бронхоэктатическая болезнь,
- ХОБЛ, • муковисцидоз.

Способствует уменьшению кашля и одышки.

- Эргономичный овальной формы мундштук
- Сумка для хранения и удобной переноски
- Можно мыть в посудомоечной машине, дезинфицировать кипячением и стерилизовать в автоклаве



Номер заказа: 018G5000



## Алгоритм использования **PARI O-PEP**

### Сборка

- Поместите воронку в нижнюю часть
- Положите металлический шарик в воронку
- Закрутите верхнюю крышку



### Процедура использования **PARI O-PEP!**

- Сядьте прямо и расслабьтесь
- Вставьте мундштук между зубами и обхватите его губами
- Вдохните медленно и глубоко через нос и задержите дыхание на 1-2 секунды
- Выдыхайте медленно через рот при этом надуйте щеки и удерживайте их в таком состоянии
- Повторите процедуру 10-15 раз



Для Достижения желаемого терапевтического эффекта проводите упражнения согласно назначению Вашего лечащего врача.

Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной инструкцией по эксплуатации **PARI O-PEP**, которая прилагается к устройству. Инструкция входит в комплект поставки прибора. Если Вы ее потеряли, Вы можете загрузить с сайта [www.pari.de](http://www.pari.de), [www.pari.com.ru](http://www.pari.com.ru) или обратиться в сервисный центр ООО "ПАРИ синергия в медицине": +7 495 981 88 60



КОПИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2018 года № РЗН 2018/7235

На медицинское изделие  
Тренажер дыхательный с переменным положительным давлением на выдохе  
PARI o-PEP тип 018

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"ПАРИ Гмбх, Специалистен фюр эффективе Инхалейшен", Германия,  
PARI GmbH, Spezialisten für effektive Inhalation, Moosstrasse 3, 82319 Starnberg,  
Germany

Производитель  
"ПАРИ Гмбх, Специалистен фюр эффективе Инхалейшен", Германия,  
PARI GmbH, Spezialisten für effektive Inhalation, Moosstrasse 3, 82319 Starnberg,  
Germany

Место производства медицинского изделия  
PARI GmbH, Spezialisten für effektive Inhalation, Moosstrasse 3, 82319 Starnberg,  
Germany

Номер регистрационного досье № РД-21017/6920 от 09.02.2018

Вид медицинского изделия 336060

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 06 июня 2018 года № 3713  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0038776



КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июня 2018 года № РЗН 2018/7235

Лист 1

На медицинское изделие

**Тренажер дыхательный с переменным положительным давлением на выдохе  
PARI o-PEP тип 018, в составе:**

1. Нижняя часть с мундштуком.
2. Воронка.
3. Шарик.
4. Верхняя часть.
5. Сумка.
6. Ремешок.
7. Руководство по эксплуатации.

7

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0043413