



Опоры-ходунки

10185

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
2.2.1 Сборка изделия.....	4
2.2.2 Блокировка задних колес.....	5
2.2.3 Блокировка передних колес.....	5
2.2.4 Регулировка тазово-поясничного стабилизатора.....	5
2.2.5 Положение ребенка в ходунках.....	5
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	8

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков 10185 (высота 47-64 см, высота 59-78 см). Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Опоры-ходунки 10185 предназначены для обучения ходьбе пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Высота 47-64 см (под рост
100-130 см)



Высота 59-78 см (под рост
130-170 см)

1.2 Технические характеристики:

- Складная рама;
- Материал: алюминий с цветным напылением;
- Передние колеса с фиксацией поворотного механизма, размер колес - 5";
- Задние колеса с храповым механизмом, размер колес - 3";

- Производство: Тайвань (Китай);
- Гарантия: 6 месяцев

1.3 Упаковка

В комплектации: ходунки, тазово-поясничный стабилизатор со страховочными ремнями в комплекте с крепежными винтами, руководство по эксплуатации.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Важные предупреждения:

- Перед каждым использованием проверяйте изделие.
- Убедитесь, что все кнопки-фиксаторы выскочили из отверстий.
- Следует протирать изделие мягким моющим средством и водой, затем высушить.
- Максимальная нагрузка - 63 кг

2.2 Порядок работы:

2.2.1. Сборка изделия

А. Вытащите изделие из упаковки.

Б. Соберите изделие, вставляя колеса в отверстия ножек, согласно написанным на них цифрам, до характерного щелчка.

В. Чтобы раскрыть ходунки, необходимо положить их на пол большими колесами вниз. Потяните на себя задние ножки с маленькими колесиками, слегка придерживая большие колеса, до характерного щелчка. Кнопки-фиксаторы, расположенные на боковых перекладинах, должны зафиксировать ходунки в разобранном состоянии.

(Чтобы сложить опоры-ходунки нажмите на кнопки-фиксаторы, приподнимите ходунки, чтобы упор был на задние ножки (с маленькими колесами) и опустите передние ножки к задним.)


Г. Закрепите тазово-поясничный стабилизатор на раме ходунков с помощью крепежных винтов.

2.2.2 Блокировка задних колес

Чтобы во время пользования ходунками ребенок не мог передвигать ходунки назад, маленькие колесики можно заблокировать, опустив храповый механизм. Соответственно, чтобы снять блокировку колесиков - поднять храповый механизм.

2.2.3 Блокировка передних колес

Передние колеса также можно зафиксировать в одном положении, чтобы ребенок мог двигаться только вперед. Для этого необходимо развернуть колеса таким образом, чтобы фиксирующие поворотные механизмы были повернуты друг к другу и против часовой стрелке поднять вверх до упора. Чтобы снять блокировку - достаточно опустить механизм вниз. (см рис.1)

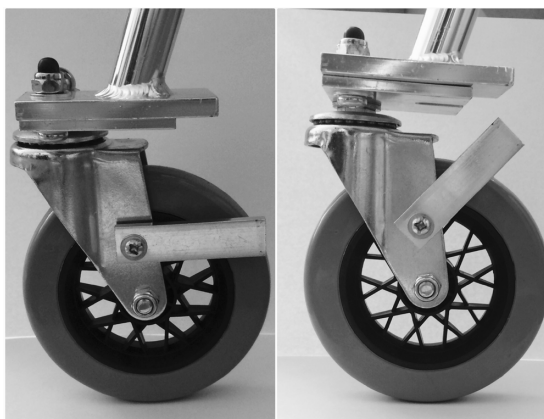

2.2.4 Регулировка тазово-поясничного стабилизатора

Чтобы отрегулировать ширину тазово-поясничного стабилизатора, необходимо ослабить фиксирующие винты и раздвинуть (или наоборот задвинуть) боковые фиксаторы до необходимой ширины и затянуть фиксирующие винты.

2.2.5 Положение ребенка в ходунках

Поставьте ребенка спиной к тазово-поясничному стабилизатору таким образом, чтобы задняя подушка была в области поясницы, зафиксируйте по ширине боковые фиксаторы и застегните ремень. Если задняя подушка стабилизатора находится ниже поясницы или выше, и ребенку неудобно, то необходимо отрегулировать ходунки по высоте с помощью кнопок-фиксаторов, расположенных на передних и задних ножках с колесами.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку всех деталей каркаса необходимо производить мягкими, неабразивными чистящими средствами, во избежании повреждений поверхностей, затем высушить.

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Опоры-ходунки 10185

Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru



Приложение 1

1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
ИНН 7734197385

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6

тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru

(адрес, телефон, факс)

в лице

Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет,

что

ОПОРЫ-ХОДУНКИ: АРТ. 10180 (ВЫСОТА 66-81 СМ.; ВЫСОТА 80-95 СМ.), АРТ. 10180-3W, АРТ. 10180-W, АРТ. 10181, АРТ. 10184HR, АРТ. 10184, АРТ. 10185 (ВЫСОТА 47-64 СМ.; ВЫСОТА 59-78 СМ.), АРТ. 10185-BA, АРТ. 10188 (ВЫСОТА 65-82 СМ.; ВЫСОТА 82-94 СМ.), АРТ. 10189, АРТ. ROLL DUO, АРТ. ROLL TRIO, АРТ. ROLL QUATTRO, АРТ. ROLL PUSH, АРТ. ROLL EURO, АРТ. QUICK, АРТ. SMART,

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ: АРТ. 10020 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА НА ХОДУНКИ, АРТ. 10038 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА НА ХОДУНКИ, АРТ. 10173 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10174 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10175 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10176 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10177 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10178 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ С ПОВОРОТОМ НА 360, АРТ. 10179 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ МОДЕЛЕЙ (10184, 10185)

Изготовитель продукции: VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД).

8th FLOOR, No 149, Sec. 2, TA TUNG Rd. 221, HSICHIN CITY, TAIPEI HSIEN, Тайвань (Китай), ЗАВОДЫ:
- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS CO. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (КИТАЙ)

- ST. YORK ENTERPRISE CO., LTD., №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (КИТАЙ)

- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, NEW CITY DISTRICT. DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (КИТАЙ)

- Shanghai Xinde Hardware Factory, Beiguan Village, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China (Китай)

Код ОК 005 (ОКП) 94 5150 Код ТН ВЭД СНГ 9021 10 100 0

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010, ГОСТ Р 51632-2000,

соответствует требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011,

ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании

протоколов испытаний: №№ 1739.014, 1687.014 от 21.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33);

№ 1124/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)

регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09870 от 21.06.2011

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 16.05.2014 Декларация о соответствии действительна до 15.05.2019



М.П.

(Подпись)

С.П.Бадалян

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.

141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anogemc.ru

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

№ РОСС TW.МЕ77.Д00351 от 16.05.2014

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



М.П.

(Подпись)

Д.А.Дружинин

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок