



Инструкция по эксплуатации

**LUX 675**

## **Назначение**

Стул для ванны Ortonica Lux 675 предназначено для проведения санитарно-гигиенических процедур в ваннных комнатах.

## **Ответственность**

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.



Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте [ortonica.ru](http://ortonica.ru)

## **Указания по технике безопасности**

Рекомендуем перед началом использования стула для ванной прочитать инструкцию по эксплуатации. Для безопасной первичной эксплуатации рекомендуем прибегнуть к помощи сторонних лиц.

Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

Не устанавливайте стул на наклонной поверхности


Перед эксплуатацией протрите изделие теплой водой с моющими средствами.

## **Распаковка и сборка**


Стул для ванной упакован в картонную коробку.

## Инструкция по сборке.


1. Закрепите две ножки стула в соответствии с приведенным ниже рисунком.

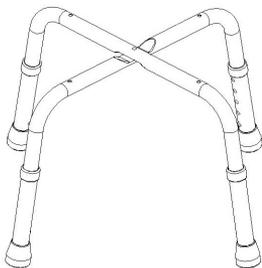

2. Расположите сиденье горизонтально и установите две ножки в углубление в соответствии с рисунком, установите собранную спинку на две неподвижные ножные трубки, правильно вставьте болты и затяните.

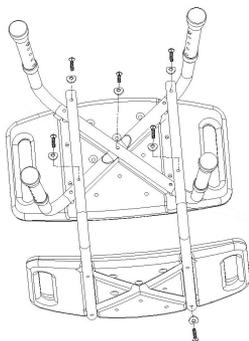

3. Отрегулируйте высоту ножек и убедитесь, что все болтовые соединения туго затянуты.

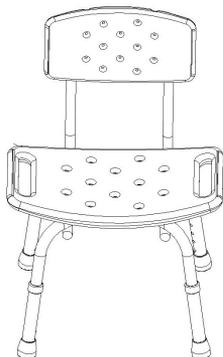

# Эксплуатация стула для ванны

## Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

## Регулировки

Сиденье для ванны Lux 675 настраивается по высоте. Чтобы изменить высоту стула необходимо сжать фиксатор и установить необходимый уровень. Затем отпустить фиксатор.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

Стул для ванны lux 675

Изготовлено:

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd. Китай,  
2018 год ОКПД 2 32.50.13.190

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2017/6447 от 09.11.2017 года



8 800 500 14 14  
[www.ortonica.ru](http://www.ortonica.ru)