

Гарантийный талон

на кресло-коляску для инвалидов: модель AMWC18FA-SF/E

1. Срок действия гарантии на кресло-коляску для инвалидов – 1 год с даты продажи.
2. Дата продажи отмечается торгующей организацией в гарантийном талоне.
3. В случае обнаружения неисправности в гарантийный период покупатель может обратиться на фирму «Москва-Амрос» для ремонта только при наличии настоящего гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные вследствие:

- удара, небрежного обращения;
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

2018

Отметка о продаже торгующей организацией

Кресло – коляска для инвалидов: модель AMWC18FA – SF/E получена в полностью укомплектованном виде, в исправном состоянии, в заводской упаковке, с руководством по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений.

Претензий к внешнему виду не имею.

С условиями действия гарантии ознакомлен.



0 664942 300613

Подпись покупателя

В регионе Москвы и Московской области гарантийное обслуживание производится по адресу: РФ, Москва, 123007, Хорошевское шоссе, д.38г
Режим работы: понедельник - пятница с 10 до 17 часов;
перерыв с 12 до 13 часов.

Адреса сервисных центров в других регионах РФ указаны на сайте www.mos-amros.ru в разделе "Сервисные центры".

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу: РФ, г. Москва, 109028, ул. Яузская, д.1/15, стр.5.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

www.mos-amros.ru E-mail: info@mos-amros.ru

Отметки о ремонте:

Кресло-коляска для инвалидов: модель AMWC18FA-SF/E



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- 1 - сиденье; 2 - подлокотники; 3 - подножки;
4 - опора для голени; 5 - опоры для стоп; 6 - рычаги для снятия подножек;
7 - передние колеса; 8 - рычаги тормоза; 9- задние колеса.

Кресло-коляска для инвалидов: модель AMWC18FA-SF/E, складная со стальной хромированной рамой, с ручным приводом, литыми шинами передних и задних колес, фиксированными подлокотниками и съёмными подножками, с опорой для голени, предназначена для передвижения больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на открытых площадках с твердым покрытием (исключая дороги), самостоятельно или с помощью сопровождающего лица.

Технические характеристики

Ширина сиденья, мм	- 460
Глубина сиденья, мм	- 460
Габариты (ШДВ), мм	- 650x1000x870
Диаметр передних колес, мм	- 200 (8")
Диаметр задних колес, мм	- 610 (24")
Ширина в сложенном состоянии, мм	- 260
Масса, кг	- 17,8
Грузоподъемность, кг	- 120
Температура эксплуатации, °С	от минус 40 до плюс 40
Стойкость к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006.	

Комплект поставки

Кресло-коляска	- 1 шт.
Узел подножек	- 2 шт.
Опора для голени	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Комплект инструментов	- 1 шт.
Упаковочная коробка	- 1 шт.

Меры безопасности

При посадке больного в кресло и высадке из него задние колеса (9) должны быть заблокированы тормозом (8), а опоры для стоп (5) подножек (3) должны находиться в вертикальном положении. Вставить на опоры для стоп (5) при посадке и высадке в кресло не допускается.

Подготовка кресла – коляски к эксплуатации

Кресло-коляска раскладывается и складывается без применения специальных средств.

Сложенную коляску положите на пол, и, потянув подлокотник и раму вверх, не перекашивая раму, раздвиньте кресло на ширину сиденья (1), затем присоедините и зафиксируйте подножки (3).

Допускается раздвинуть коляску, находящуюся в вертикальном положении. Для хранения и транспортировки сложите коляску, потянув вверх мягкие рукоятки на сиденье (1) и сдвинув вместе подлокотники (2).

Подножки

Кресло-коляска комплектуется съёмными подножками (3) с опорами для стоп (5) и опорой для голени (4).

Для снятия подножки (3) нажмите на рычаг (6), поверните и снимите подножку со штифтов.

Подлокотники

Кресло-коляска комплектуется фиксированными подлокотниками (2)

Тормоз

Кресло-коляска оборудована стояночными тормозами (8) обоих задних колес (9). Для торможения передвиньте рычаг тормоза (8) вперед до полной блокировки задних колес.

Обслуживание и уход при эксплуатации

Очистку поверхности сиденья и спинки кресла коляски производите теплой водой со стиральным порошком.

Механизм складывания периодически смазывайте машинным маслом.

Не допускайте повреждения декоративных покрытий кресла-коляски твердыми и острыми предметами.

Во время движения не сдвигайтесь на сиденье вперед и не допускайте ударов передних колес о препятствия и неровности на дороге (камни, выбоины, дорожный бордюр).

В случае ослабления фиксации опоры для стоп (5) или смещения её по высоте снимите подножку (3) со штифтов, ослабьте болт-фиксатор в её торце и восстановите положение опоры. Затяните болт-фиксатор по часовой стрелке и установите подножку на место.

Кресло-коляска для инвалидов: модель AMWC18FA-SF/E



Регистрационное удостоверение Росздравнадзора

№ ФСЗ 2007/00972 от 26.12.2007

Производитель



"Амрус Энтерпрайзис Лтд.", США,
Amrus Enterprises, Ltd., 720 King Georges Post Road,
Suite 3E, Fords, New Jersey 08863, USA

Место производства

Amrus Enterprises, Ltd., 720 King Georges Post Road,
Suite 3E, Fords, New Jersey 08863, USA

Импортер / организация-уполномоченная на принятие претензий

ЗАО фирма «Москва-Амрос»,
РФ, Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр.4

Соответствие требованиям

ГОСТ Р 50444-92(р.п. 3,4) ГОСТ Р 51081-97
ГОСТ Р 51083-97 ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006

Срок службы

не менее 5 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к креслу-коляске срок службы может быть значительно больше указанного.

Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию кресла-коляски по истечении указанного срока службы, или для проведения гарантийного обслуживания, обратитесь по адресу, указанному торгующей организацией.