



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кровати функциональные медицинские механические

производства Хэбэй Байцянь Медикал Егуипмент Мануфактуринг Со.,ЛТД, Китай
Hebei Baiqiang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd
Hexiying Village of North Changtan Road Dachang County, Hebei Province, China

Номер партии: 0520215.12201-41/21

Назначение изделия.

Кровати функциональные медицинские механические являются новой продукцией, разработанной нашими старшими научными сотрудниками и основанными на опыте ухода за больными и оказания физиотерапевтической помощи профессорами крупных клиник. Многочисленные полезные функции удовлетворяют различные потребности больных и медицинского персонала. Среди отличительных черт новой продукции – практичность, привлекательный внешний вид, легкость в обращении и удобство использования в отделениях больниц, поликлиник и в домашних условиях. В зависимости от конструкции, кровати делятся от трех, четырех и более секций на ложементе. Также, некоторые модели кроватей имеют функции подъема спинной и ножной секции, кардиокресло, боковое переворачивание «Тренделенбург», «Анти-Тренделенбург», регулировка по высоте.

Принцип конструкции:

Нижняя и несущая средняя рамы кровати выполнены из стального профиля и покрыты ударопрочной эпоксидной эмалью.

Торцевые ограждения (изголовье и изножье) кровати легкоъемные, могут быть выполнены как из пластика (в том числе, со стальной трубой и/или декоративными вставками), так и из ЛДСП и массива натуральной древесины.

Внимание! Оттенки цветов изголовий и изножий, изготовленных из натуральной древесины, могут несколько отличаться.

Кровать оборудована туалетным устройством.

Колеса имеют шины из полиуретана и оснащены индивидуальными тормозами. Каждое колесо является самоориентирующимся, с возможностью поворота на 360°.

Ниже приведены общие характеристики изделий:

ГОСТы	
Соответствие требованиям национальных стандартов	ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4)
Обозначение знака соответствия при сертификации	ГОСТ Р 50460-92
Транспортная маркировка грузовых мест	ГОСТ 14192-96.
Транспортировка	Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69
Упаковка	ГОСТ Р 50444-92



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

Условия хранения	Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69
Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях	1 по ГОСТ Р 51609-2000

1. Сборка и эксплуатация

Откройте коробку и снимите упаковку. Переверните ложемент и установите колеса. Установите кровать на колеса и поставьте их на тормоз, установите изголовье и изножье. Вставьте раму для подтягивания и трансфузионную стойку в соответствующие отверстия. Установите боковые ограждения.

Перед использованием обработайте поверхность изделия дезинфицирующим раствором или влажной тряпкой. Убедитесь, что все соединительные элементы надежно закреплены. Кровать готова к работе.

Согласно инструкции пользователи могут осуществлять сборку самостоятельно, но изготовитель настоятельно рекомендует доверить сборку квалифицированным специалистам.

2. Электрический компрессор для надувного матраса*

(1) Технические данные

Допустимое напряжение: АС 220-240В 50-60 Гц

Потребляемая мощность: не менее 20Ватт

Максимальная нагрузка: не более 150кг

(2) Использование:

Перед началом работы с компрессором, пожалуйста, прочтите инструкцию:

- Убедитесь, что на месте эксплуатации матраса отсутствуют выступающие острые предметы.
- Подсоедините шланг подачи воздуха к компрессору с одной стороны, и клапану матраса с другой
- Выставьте регулятор подачи воздуха в максимальное положение и нажмите кнопку «On». Лампочка индикатора загорится и компрессор начнет работать.
- Регулятором подачи воздуха отрегулируйте жёсткость матраса до оптимальной для больного.
- Компрессор должен эксплуатироваться и храниться в сухом и чистом помещении, защищенным от пыли и влаги.

*поставляется опционально

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

▪Строго соблюдайте требования, указания и рекомендации, содержащиеся в настоящем Паспорте изделия

▪Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающей кроватью.

▪Перед использованием проверяйте корректность функционирования всех подвижных частей кровати, проверяйте надежность затяжки крепежных элементов и отсутствие ослабленных соединений, убедитесь в отсутствии в помещении помех (мебель, стены, подоконники и т.п.), препятствующих нормальному функционированию кровати



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 3010181040000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

▪Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия на наличие видимых дефектов и повреждений. При обнаружении повреждений, влияющих на безопасность эксплуатации изделия, или при возникновении посторонних шумов в процессе работы незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

▪Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кровать, указанную на заводской наклейке. Запрещено вставать и сидеть на отдельно поднятых секциях, опираться на торцевые ограждения или иным образом перегружать кровать. Повреждения изделия, полученные в результате превышения нагрузки, не являются гарантийным случаем.

▪Избегайте попадания посторонних предметов и частей тела между движущимися элементами конструкции кровати в процессе эксплуатации, это может привести к травме или повреждению оборудования

▪Избегайте чрезмерного натяжения, спутывания, перекручивания или повреждения (в том числе – движущимися частями кровати) электрических проводов и провода пульта управления (при наличии).

▪При наличии электрических приводов гибридного типа (с возможностью вращения привода механической рукоятью при отсутствии электропитания): перед началом использования механической рукоятки убедитесь, что кабель питания кровати отключен от розетки сети переменного тока.

▪Тормоза колес стоящей кровати (при наличии) должны быть заблокированы. Разблокировка колес производится только при необходимости перемещения кровати.

▪Не допускается перемещение кровати при заблокированных колёсах.

▪Не допускается перемещение кровати вместе с пациентом, это может привести к травмам.

▪Не допускается перемещение кровати за боковые ограждения.

▪Колеса на кровати предназначены для её передвижения на короткие расстояния по твердому ровному полу внутри помещения, в котором установлена кровать. Не допускается использование кровати вне помещений, перемещение её по грунту и другой несоответствующей поверхности.

▪Во избежание повреждений, избегайте ударов и столкновений кровати с твердыми предметами при её перемещении.

▪Использование кровати в качестве каталки, для перемещения между помещениями, по коридорам, перекатывание кровати через препятствия порошкового типа, выбоины в полу и иные большие неровности расценивается как использование кровати не по назначению и может послужить основанием для отказа в гарантийном ремонте.

▪Запрещается размещение не предусмотренных конструкцией предметов или оборудования на раме кровати или ее использование в качестве опоры для человека.

▪В случае когда необходимо оставить пациента без присмотра, поднимите боковые ограждения и приведите положение кровати в нулевую позицию: все секции ложа расположены горизонтально, ложе кровати опущено в крайнее нижнее положение (при наличии функции регулировки высоты ложа).

▪Пульт управления (при наличии) следует протирать слегка влажной хлопчатобумажной тканью, предварительно отключив кровать от источника питания. Не протирайте пульт управления



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

жидкостями, имеющими в основе бензин, ацетон, растворители и/или другие агрессивные соединения.

▪ Во избежание повреждения, избегайте падения пульта управления на твердую поверхность или в воду.

▪ При повреждении пульта управления не пытайтесь заменить детали или починить его самостоятельно. Обратитесь к поставщику или официальному представителю производителя в Вашем регионе для замены.

▪ В процессе эксплуатации кровать следует содержать в чистоте

▪ Если изделие перестало функционировать и/или персонал не может осуществлять контроль при помощи пульта управления (при наличии), незамедлительно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр

▪ Утилизировать изделие после окончания срока службы и упаковку после сборки необходимо согласно правилам и нормам, предусмотренным законодательством страны эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменить конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

3. Обслуживание и ремонт

1. Если изделие долгое время не используется, его нужно проверять не реже, чем раз в 3 месяца.
2. Механические подвижные части изделия должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.
3. Регулярно, с интервалом не реже 1 раза в 2 недели, проверяйте силовые узлы подъёмных механизмов на наличие смазки. При необходимости (но не реже, чем 1 раз в 6 месяцев) смазывайте.
4. В случае обнаружения неисправностей изделие должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами или возвращено производителю.

Запрещается использование изделия с признаками неисправностей.

4. Транспортировка и хранение

Изделие должно храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах

5. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.,
- боковые ограждения – 1 пара.,
- изголовье/изножье – 1 пара,
- рама для подтягивания – 1 шт.,*
- инфузионная стойка – 1 шт.,*
- прикроватный (накроватный) столик*.,



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
 ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
 р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
 г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
 тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

- обеденный столик*.,
- полка*,
- прикроватная тумбочка*,
- матрас*
- надувной матрас*
- туалетное судно*
- ванночка для мытья головы*

*опционально, поставляется в зависимости от пожеланий заказчика.

Внимание!

Инструменты для сборки в комплект поставки не входят

Таблица технических характеристик

Артикул Модель	Размер ложа, мм	Регулировка секций ложа				Высота ложа, мм	Масса**, кг	Нагрузка***, кг
		Тип привода/ Угол, град (не менее)*						
		Секция спины	Секция бедренно- икроножн ая	Секция икроножно- опорная	Туалетное устройство			
F-8 (ММ-2004Д-04)	2000*900	Механический / 00-75	Механический / 0-45	-	-	500	45-65	250
E-45A (ММ-5124Д-01)	2150-930	Механический / 00-75	Механический / 0-30	Механический/ 0-45	Механический	500	85-105	200
F-48(ММ-2012Р-01)	2000*900*500	Механический / 00-75	Механический / 0-45	-	От 0 до14 От 0 до 14 Газовый упор	-	50	не более 20

* Предельные отклонения указанных параметров не превышают $\pm 10\%$.

** Масса изделия может варьироваться в зависимости от комплектации

*** Нагрузка – это допустимая максимальная рабочая нагрузка на ложе кровати, включая вес пациента, матраса, дополнительного оборудования, капельниц, пакетов и т.д.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

«Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Телефон Сервисного Центра ООО «Медтехника Москва»: +7 (495) 5042651

Дата продажи: « » 20__г

Отметка о продаже: печать, подпись продавца