

## Гигиена и уход за устройством PARI O-PEP



### Подготовка

- Разберите PARI-O-PEP
- Выньте металлический шарик из воронки
- Снимите ремешок с нижней части прибора



### Очистка

- Промойте проточной водой с небольшим количеством моющего средства
- Тщательно прополощите в проточной воде



### Дезинфекция

- Прокипятите в достаточном количестве кипящей воды покрывающей все части устройства в течение 5 мин
- или**
- В термодезинфекторе для стерилизации бутылочек для детского питания не менее 6 мин



### Сушка

- Поместите компоненты на чистую сухую неволокнистую салфетку и оставьте для просушивания

### или

- Используйте для просушивания бытовой фен



### Хранение


- После высушивания соберите прибор и храните его в сумке



# PARI O-PEP

Осциллирующее положительное давление на выдохе

Эффективная терапия по очистке дыхательных путей посредством удаления бронхиального секрета

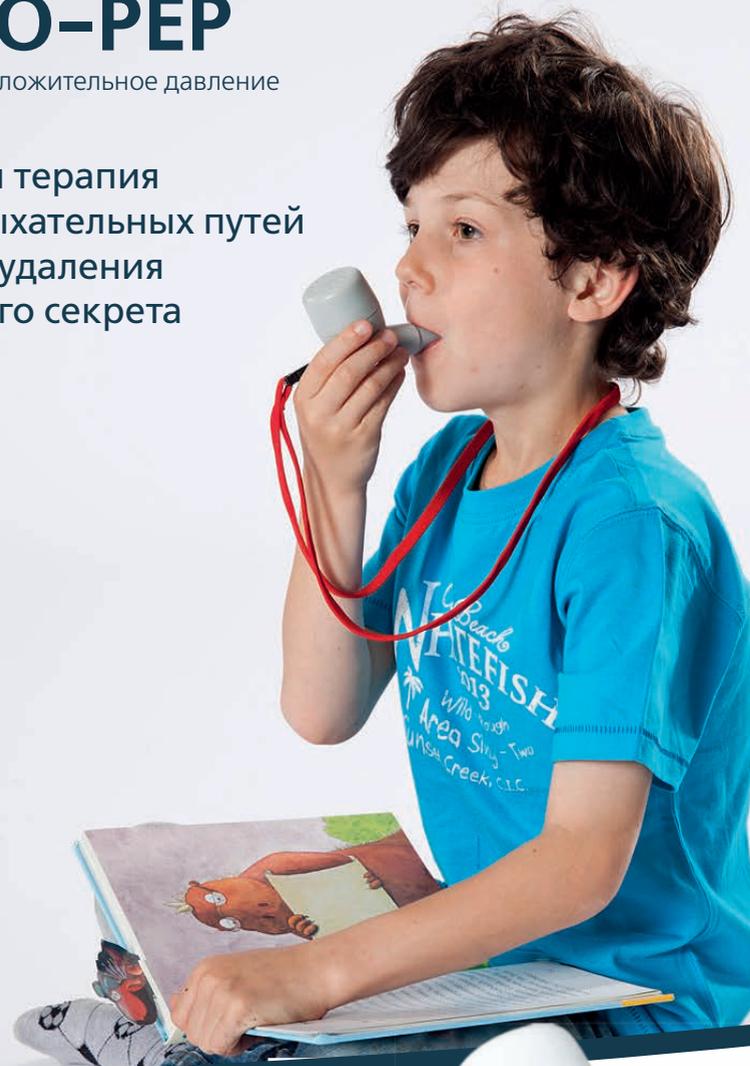

PARI O-PEP

## Советы по применению и гигиена

[www.pari.de](http://www.pari.de)  
[www.pari.com.ru](http://www.pari.com.ru)

PARI Сервисный центр...

+7 495 981 88 60

Звоните нам...

ООО "ПАРИ синергия в медицине"

117418 Москва, а/я 16

тел/факс: +7 495 981 88 60

+7 499 128 98 27

[pari-synergy@mail.ru](mailto:pari-synergy@mail.ru), [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

[www.pari.com.ru](http://www.pari.com.ru), [www.pari.de](http://www.pari.de)

Специалисты в эффективной ингаляции



Специалисты в эффективной ингаляции



# **PARI O-PEP** приспособление для мобилизации бронхиального секрета и очищения дыхательных путей

Применяется для улучшения отхождения мокроты при острых и хронических заболеваниях нижних отделов дыхательных путей, при таких заболеваниях как:

- бронхиальная астма, • бронхоэктатическая болезнь,
- ХОБЛ, • муковисцидоз.

Способствует уменьшению кашля и одышки.

- Эргономичный овальной формы мундштук
- Сумка для хранения и удобной переноски
- Можно мыть в посудомоечной машине, дезинфицировать кипячением и стерилизовать в автоклаве



Номер заказа: 018G5000



## Алгоритм использования **PARI O-PEP**

### Сборка

- Поместите воронку в нижнюю часть
- Положите металлический шарик в воронку
- Закрутите верхнюю крышку



### Процедура использования **PARI O-PEP!**

- Сядьте прямо и расслабьтесь
- Вставьте мундштук между зубами и обхватите его губами
- Вдохните медленно и глубоко через нос и задержите дыхание на 1-2 секунды
- Выдыхайте медленно через рот при этом надуйте щеки и удерживайте их в таком состоянии
- Повторите процедуру 10-15 раз



Для Достижения желаемого терапевтического эффекта проводите упражнения согласно назначению Вашего лечащего врача.

Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной инструкцией по эксплуатации **PARI O-PEP**, которая прилагается к устройству. Инструкция входит в комплект поставки прибора. Если Вы ее потеряли, Вы можете загрузить с сайта [www.pari.de](http://www.pari.de), [www.pari.com.ru](http://www.pari.com.ru) или обратиться в сервисный центр ООО "ПАРИ синергия в медицине": +7 495 981 88 60