



Сиденье с санитарным устройством к опорам-ходункам,  
артикул: Barry HR.



Руководство по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА _____	4
1.1 Назначение _____	4
1.2 Технические характеристики _____	4
1.3 Упаковка _____	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ _____	4
2.1 Важные предупреждения _____	4
2.2 Порядок работы _____	4
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _____	5
4. ХРАНЕНИЕ _____	5
5. ТРАНСПОРТИРОВКА _____	5
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА _____	6

Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретая Сиденье с санитарным устройством к опорам-ходункам, артикул: Barry HR.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие дефектов и повреждений.

## 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение

Сидение с санитарным устройством к опорам-ходункам предназначено для упрощения жизни людей, с проблемами с функционированием опорно-двигательного аппарата, облегчения поездок на дальние расстояния и повсеместного использования в путешествия или же в не стандартных условиях.

### 1.2 Технические характеристики

Характеристика	Величина
Ширина основания насадки, крепящиеся на опоры-ходунки, мм.	250
Максимальная ширина сиденья с санитарным устройством к опорам-ходункам, мм.	400
Длина сиденья с санитарным устройством, мм.	550
Высота сиденья с санитарным устройством, мм.	50
Диаметр отверстия, мм.	230
Максимальная ширина отверстия, мм.	260
Требуемое расстояние между поручнями опор-ходунков, мм.	480

### 1.3 Упаковка

В комплектации: сидение с санитарным устройством к опорам-ходункам Barry HR с крышкой.

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Важные предупреждения

- До и после каждого использования необходимо протирать изделие мягким моющим средством и водой.
- Следите за целостностью конструкции и за появлением сколов и трещин.

### 2.2 Порядок работы

- Перед каждым использованием убедитесь в целостности сиденья, а так же необходимо убедиться в целостности балок опор-ходунков, на которые будет установлено данное сиденье.

- После чего протрите сиденье, если оно не находилось в условиях защищенных от внешних воздействий.
- Поместите сиденье на опоры-ходунки.

### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации следите за целостностью сиденья.

### 4. ХРАНЕНИЕ

Упакованное сидение с санитарным устройством к опорам-ходункам Barry HR должно храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей. Хранение надлежит осуществлять при следующих условиях: Температура: от +2°C до +50°C; относительная влажность: 45 - 75 % (без конденсации); атмосферное давление: 500 - 1060 гПа.

### 5. ТРАНСПОРТИРОВКА

Сидение с санитарным устройством к опорам-ходункам Barry HR можно транспортировать любыми видами транспорта. При транспортировке водным, смешанным железнодорожно-водным или авто-водным транспортном упаковке должны прокладываться слоем водонепроницаемой или полиэтиленовой пленкой. Температура: от - 20°C до + 50°C; относительная влажность: до 70 % (без конденсации); атмосферное давление: 500 - 1060 гПа.

Технические характеристики товара могут незначительно отличаться из-за постоянного улучшения производителем качества продукции.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 6 месяцев со дня продажи изделия и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

Срок службы - 5 лет

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Производитель: «Валентайн Интернейшнл Лтд», Тайвань, Китай  
8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Телефон: 8 (495) 792-31-90,

8 (800) 200-31-90

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Для заметок