

Правила ухода:

- 👉 Стирайте компрессионные изделия только вручную
- 📏 Температура стирки не должна превышать 30°С
- ✖️ Нельзя использовать отбеливатели, химически активные добавки
- ✖️ Запрещается гладить изделия
- ✖️ Сушите компрессионные изделия в прохладном месте, избегая нагревательных приборов

Для сохранения медицинских свойств и удаления загрязнений рекомендуется ежедневная стирка.


Для стирки рекомендуется использовать жидкое, нейтральное моющее средство. Рекомендуется протереть силикон на чулках слабым спиртовым раствором для улучшения свойств налипания.


Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.


Дата производства изделия: указана на этикетке в номере партии «Lot»: последние шесть цифр обозначают год и неделю производства. Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации.


Соответствие стандартам: Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2013/928 от 07.12.2017 года. Декларация о соответствии.


Расшифровка символов, применяемых на упаковке:

 Знак соответствия. На продукцию оформлена декларация о соответствии

 Сертификация CE

 Соответствие международным стандартам качества

 Сделано в Европе

 Соответствие стандарту безопасности в текстильном производстве


Гарантийный срок:


6 месяцев на сохранение медицинских свойств (гарантия отсчитывается с момента продажи изделия).


Гарантийными случаями не являются:


- ▶ механические повреждения (включая случайные)
- ▶ повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- ▶ дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием
- ▶ любые внесения изменений в конструкцию

Гарантия не распространяется на упаковку.

 Обратитесь к инструкции по применению

 Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами

 Не содержит латекс

 Производитель

 Модель

 Код партии

IM_JW_PRO_3_RU_A6_3618

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

B.Well 
rehab

Изделия медицинские компрессионные:

Гольфы JW-111 • Чулки JW-212 • Колготки JW-311

Серия PRO: профессиональный подход к профилактике отеков

Компрессионный трикотаж B.Well rehab серии PRO предназначен для улучшения венозного оттока при начальных стадиях заболеваний вен.

Механизм действия компрессионного трикотажа основан на распределенном давлении: максимальное давление в области щиколотки 18-22 мм рт. ст., уменьшается в области голени, в области бедра компрессия минимальна.

Благодаря воздействию трикотажа на поверхностные вены:

- ▶ улучшается работа венозных клапанов
- ▶ перераспределяется кровоток в глубокие вены
- ▶ улучшается отток крови снизу-вверх

Все изделия проходят проверку на медицинскую эффективность согласно Британскому стандарту BS 6612.

Особенности:

- ▶ анатомическая вязка «объемными сотами» позволяет достичь комфортного прилегания изделия и правильного распределения давления по ноге
- ▶ комплексные нити с двойной S-образной оплеткой придают изделиям эластичность и необходимый компрессионный эффект
- ▶ особое плетение на стопе обладает массажным эффектом, уменьшает усталость и стимулирует кровообращение стопы
- ▶ усиленные носок и пятка уменьшают риск случайных повреждений
- ▶ тонкий и прозрачный трикотаж приятно носить даже в теплое время года

Показания (I class · 18-22 мм рт. ст.):

- ▶ профилактика варикозной болезни
- ▶ отеки к концу дня, тяжесть в ногах к вечеру
- ▶ боль, судороги, чувство онемения или «мурашек» в ногах
- ▶ «сосудистые звездочки» или выраженный сосудистый рисунок на коже ног
- ▶ наличие факторов риска: генетическая предрасположенность, прием контрацептивов, малоподвижный образ жизни, частые поездки и др.

Противопоказания:

- ▶ септическое заболевание вен и мягких тканей
- ▶ сердечно-легочная недостаточность
- ▶ трофические язвы нижних конечностей

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

Производитель: **Би.Велл Свисс АГ**, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

Место производства: Барселком Текстиль, С.А., Парк Индастриал Тамел С. Вериссимо, Лугар-да-Кашада, округ Брага, 4750-734 Барселаш – Португалия. Сделано в Португалии

B.Well 
rehab

www.bwell-swiss.ru



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

⚠ Предупреждения

Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть аллергическая предрасположенность к компонентам, входящим в состав материала.

Порядок надевания:

Рекомендуется надевать компрессионный трикотаж утром до появления отеков. Прежде чем приступить к надеванию изделия, проверьте, чтобы ваши руки были подготовлены: отсутствие колец на пальцах, аккуратно подстриженные ногти, отсутствие заусенцев.

1. Соберите изделие до пятки. Аккуратно натяните на ступню. Проверьте правильность расположения пятки.



2. Постепенно надевайте трикотажное изделие разглаживающими движениями



3. Аккуратно уберите складки при необходимости



4. Натяните изделие до талии (в том случае, если это колготки)



ⓘ **Внимание:** Следует проконтролировать правильное расположение и посадку изделия. При появлении необычных симптомов следует прекратить использование изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

Режим ношения:

Для профилактики отеков следует носить компрессионный трикотаж в течение дня, если иное не рекомендовано врачом.


Если Вы снимаете изделие в течение дня, рекомендуется надевать его снова после 10-15 минутного отдыха ног в приподнятом положении.

Комплектность:

- ▶ гольфы – 1 пара в упаковке, инструкция
- ▶ чулки – 1 пара в упаковке, инструкция
- ▶ колготки – 1 штука в упаковке, инструкция

Правила подбора:

Чтобы облегчить и упростить подбор необходимого размера трикотаж специалистами B.Well Swiss рекомендуют пользоваться росто-весовой таблицей.

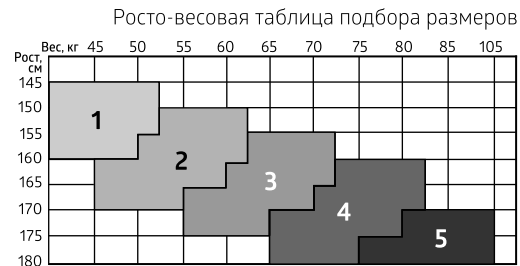

Компрессионный трикотаж B.Well rehab также можно подобрать, используя таблицу, основанную на индивидуальных измерениях.

Такие измерения лучше проводить с утра, до появления отеков.

Таблица измерений для подбора размеров колготок, чулок, гольфов

Измерение, сантиметры	Размер ступни	Окружность самой узкой части голени над лодыжками	Окружность голени в самом широком месте	Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	Окружность талии	Длина от пола до ягодичной складки	
1	до 23	19-21	29-34	47-55	до 65	69-72	
2	23-24	21-23	32-37	52-62	60-78	71-75	
3	24-26	23-25	35-41	57-66	70-90	73-78	
4	26-27	25-28	39-45	60-70	75-110	76-81	
5	от 27	от 28	от 42	от 65	от 90	78-83	

Для колготок существуют ограничения по окружности талии (t): **1-3 размеры** – до 90 см; **4-5 размеры** – до 110 см. Для чулок, колготок маркировка размеров обозначена цветной полосой: **2 – зеленый, 3 – красный, 4 – голубой, 5 – серый.**

Для гольфов маркировка размера обозначена количеством полос на резинке.

Состав:

Наименование изделия	Класс компрессии	Состав
Изделия медицинские компрессионные: Гольфы JW-111	I class, 18-22 мм рт. ст.	74% Полиамид 26 % Эластан
Изделия медицинские компрессионные: Чулки JW-212*		74% Полиамид 26 % Эластан
Изделия медицинские компрессионные: Колготки JW-311		74% Полиамид 26 % Эластан

* содержит силикон