

Пошаговая инструкция санации полости рта набором CleanMouth производства ООО «ОландМед»			
Описание проводимых действий		Рекомендуемая длительность обработки	Периодичность обработки
ШАГ 1. Обработка катетером Янкауэра			
	Подсоединить катетер к ручке, открыть рабочую часть катетера Янкауэра, перевести переключатель ручки в положение «Открыто»		УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР
	Очистить полость рта	не менее 1 мин.	
	Промыть катетер, закрыть защитную оболочку, разместив головку катетера до упора в глубине защитного раструба, перевести переключатель ручки в положение «Закрыто»		
	Снять катетер с ручки, отложить		
ШАГ 2. Чистка зубов зубной щеткой			
	Подсоединить щетку к ручке, перевести переключатель ручки в положение «Открыто»		УТРО и ВЕЧЕР
	Почистить тщательно зубы и десневые карманы	не менее 1 мин.	
	Перевести переключатель ручки в положение закрыто, снять зубную щетку с ручки, утилизировать		
ШАГ 3. Завершающая обработка тампоном			
	Подсоединить тампон к ручке, перевести переключатель ручки в положение «Открыто»		УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР
	Рекомендуется обильно смочить тампон антисептиком, обработать полость рта и удалить оставшиеся загрязнения	не менее 1 мин.	
	Перевести переключатель ручки в положение закрыто, снять тампон с ручки. Тампон утилизировать		