



PARI COMPACT

профессиональный прибор
для домашнего использования

В комплектации:

- компрессор тип 053
- фильтр к компрессору
- держатель фильтра
- небулайзер-распылитель
- трубка-воздуховод
- шнур электропитания

PARI COMPACT – Компрессорный ингалятор с небулайзером **ПАРИ ЛЦ** для распыления лечебных растворов предназначенных для небулайзерной терапии и физиологического раствора поваренной соли для увлажнения слизистой оболочки дыхательных путей при лечении:

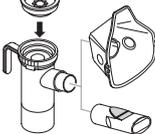
- Фарингитов
- Пневмонии
- ХОБЛ
- Бронхитов
- Сезонных аллергических заболеваний дыхательных путей
- Бронхиальной астмы
- В период отказа от курения

*Качество
по доступной цене*

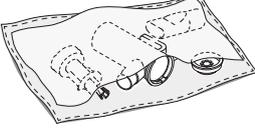
Специалисты в эффективной ингаляции



Подготовка и проведение небулайзерных ингаляций с помощью распылителей **ПАРИ ЛЦ плюс**

				
<p>Перед каждой ингаляцией тщательно вымойте руки.</p>	<p>Возьмите чистый сухой небулайзер. Отсоедините верхнюю крышку с клапаном вдоха от небулайзера.</p>	<p>Возьмите емкость с лекарством. Поместите необходимое количество медикамента в камеру небулайзера. Важно! Для ингаляции используйте только те медикаменты, которые назначил врач.</p>	<p>Вновь присоедините крышку к небулайзеру. Присоедините также к небулайзеру мундштук или маску. Важно! Существует несколько разных масок к небулайзеру ПАРИ ЛЦ плюс (маска детская и взрослая жесткая из пластмассы, ПАРИ Смарт маска для взрослых из силикона, ПАРИ Беби маска из силикона с переходником).</p>	<p>Для маски ПАРИ Беби используете специальный переходник, позволяющий изменять позицию маски в зависимости от положения ребенка (лежа или сидя).</p>
				
<p>Сядьте прямо и удобно, откинувшись на спинку стула, кресла или перед столом, опершись локтями на стол.</p>	<p>Включите прибор. Начинайте ингаляцию сразу после появления аэрозоля из небулайзера.</p>	<p>Поместите мундштук между зубами и плотно обхватите мундштук губами. Язык не должен препятствовать выходу аэрозоля. При использовании маски следите, что она покрывает нос и рот.</p>	<p>Положение небулайзера должно быть вертикальным. Маленьким детям накладывайте с легким нажатием маску на нос и рот.</p>	<p>Делайте медленный спокойный вдох и выдох через мундштук или маску без усилий с короткой паузой в конце вдоха. Изменение звука работы небулайзера означает полное распыление медикамента.</p>

Гигиена и содержание небулайзеров **ПАРИ ЛЦ плюс** в домашних условиях

		
<p>Очистка</p> <ul style="list-style-type: none"> Разберите небулайзер на составляющие части. Промойте части небулайзера горячей водой с добавлением моющего средства. Промойте части небулайзера под проточной водой. 	<p>Дезинфекция</p> <ul style="list-style-type: none"> Небулайзер можно дезинфицировать в достаточном количестве кипящей воды в течение 15 минут. ИЛИ В дезинфекторе (например, для детских бутылочек). 	<p>Высушивание</p> <ul style="list-style-type: none"> При использовании дезинфектора высушивание не требуется, небулайзер может храниться в корзине прибора до следующего использования. Высушивание при комнатной температуре в течение 4 часов. Высушивание с помощью бытового фена.
		
<p>Хранение</p> <ul style="list-style-type: none"> Завернутым в чистую, проглаженную неволокнистую салфетку или полотенце. 	<p>Содержание небулайзера</p> <p>Небулайзер ПАРИ ЛЦ плюс трубка-воздуховод, фильтр для компрессора могут использоваться в течение 1 года, после чего подлежат замене. Важно! В комплект ежегодной замены ПАРИ ЛЦ плюс входит: Небулайзер; Трубка-воздуховод; Фильтр для компрессора.</p>	<p>ПАРИ ЛЦ плюс комплект ежегодной замены номер заказа 022G8010</p>