

Общие сведения об изделии




Наименование изделия: Спинной ремень (Подвес)

1. Назначение изделия


Спинной ремень (Подвес) используется с подъемником для подъема и перемещения внутри помещения людей с ограниченными возможностями по здоровью.

Изготовлен из 100% полиэстера - материал с водоотталкивающими свойствами прочный и простой в обслуживании. Два варианта исполнения: «Сплошной» и «Сетка»


2. Основные технические данные

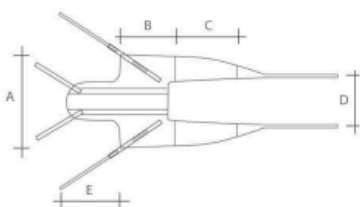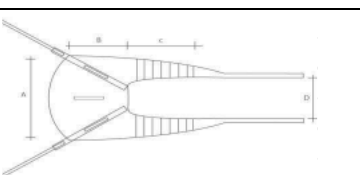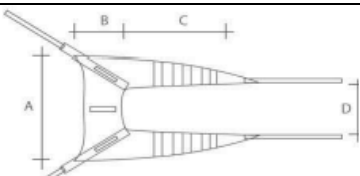Comfort		M	L	XL
		40-90кг	70-120кг	100-200кг
	A	780мм	840мм	910мм
	B	400мм	450мм	510мм
	C	450мм	500мм	560мм
	D	300мм	360мм	440мм
	E	390мм	410мм	420мм
Regular		M	L	XL
		40-90кг	70-120кг	100-200кг
	A	780мм	840мм	910мм
	B	400мм	450мм	510мм
	C	450мм	500мм	560мм
	D	300мм	360мм	440мм
Hygienic		M	L	XL
		40-90кг	70-120кг	100-200кг
	A	780мм	840мм	910мм
	B	400мм	450мм	510мм
	C	450мм	500мм	560мм
	D	300мм	360мм	440мм

Точность измерений: ±15 мм / 1,5 кг. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

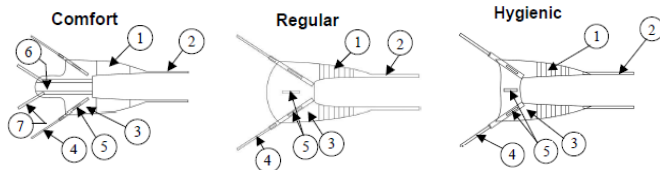

- ① - Бедренная секция
- ② - Стропа Бедренной секции
- ③ - Спинальная секция
- ④ - Стропа Спинальной секции
- ⑤ - «Ручки» для перемещения
- ⑥ - Подголовник
- ⑦ - Стропа Подголовника

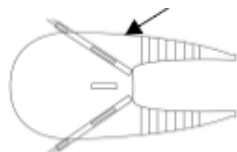

Размеры обозначаются кантом определенного цвета:

- M- Желтый кант
- L – Синий кант
- XL – Черный кант

3. Эксплуатация

Крепление стропы к траверсе осуществляется при помощи петель на стропах и крючков на траверсе. Петли строп представлены четырьмя цветами.

Стропа


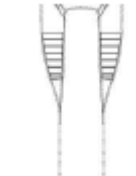









Траверса



Черный Желтый Красный Зеленый

Комбинируя расположение петель стропы на траверсе можно создать для Пациента комфортное положение для перемещения его на подвесе подъемника.

Положение Пациента зависит от его роста и веса.

	Цвет петли стропы Спинальной секции		Цвет петли стропы Бедренной секции	Цвет петли стропы Подголовника (только для подвеса Comfort)
				
	Зеленый		Зеленый	Зеленый
	Красный		Красный	Красный
	Желтый		Желтый	Желтый
	Черный		Черный	Черный

4. Правила эксплуатации

Не превышайте максимальную допустимую нагрузку. Соблюдайте инструкции по уходу и обслуживанию. Используйте только в соответствии с инструкциями.

5. Обслуживание и уход

Срок эксплуатации спинного ремня (подвеса) зависит от обращения с ним, хранения, регулярного и текущего обслуживания, а также чистки

Очищайте спинной ремень (подвес) смоченной в горячей воде влажной тряпочкой. Для удаления труднотомываемой грязи используйте неагрессивное моющее средство.

Спинной ремень (подвес) можно стирать в стиральной машине при температуре + 60°C (+ 140 °F):



- Не использовать хлорный отбеливатель.
- Не сушить в стиральной машине.
- Не гладить.

6. Комплексная проверка технического состояния

В обычных условиях эксплуатации проверку технического состояния спинного ремня (подвеса) рекомендуется осуществлять перед каждым использованием и после стирки.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

При транспортировке, хранении и эксплуатации необходимо следовать следующим инструкциям:

- Температура окружающей среды от +5°C до +45°C
- Относительная влажность воздуха должна быть в пределах от 30% до 70%
- Необходимо обеспечить достаточное покрытие или упаковку для защиты от повреждений.

8. Состав изделия и комплектность поставки

Спинной ремень (подвес) – 1 шт

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный период для принятия претензий по гарантии (заводской брак) составляет 12 месяцев.

10. Утилизация

Никаких специальных рекомендаций по утилизации не требуется. Не выбрасывайте подвес в не предназначенных для свалки местах – его необходимо утилизировать в соответствии с принятыми в стране правилами утилизации.

11. Сведения об изделии

Спинной ремень (Подвес) соответствует требованиям следующих стандартов: EN ISO 10535: 2006
Подъемники для инвалидов

Год изготовления 2022

Срок службы три года

Comfort			Regular			Hygienic		
С подголовником			Стандарт			С гигиеническим вырезом		
«Сплошной»		«Сетка»	«Сплошной»		«Сетка»	«Сплошной»		«Сетка»
M	L	XL	M	L	XL	M	L	XL


Спинной ремень - Подвес (мягкое сиденье)

CE

Технический паспорт



«Сплошной»

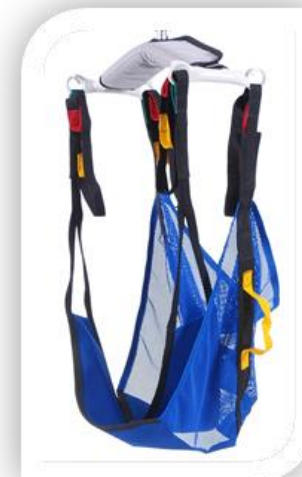

«Сетка»

aacurat gmbh

hilfsmittel für die alten- und krankpflege

Изготовлено компанией VERMEIREN N.V.
по заказу и под контролем компании Aacurat GmbH