



Насадки на унитаз
10528, 10528А, 10528А/Т,
10527L, 10545, 10540



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	6
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	6
2.1 Важные предупреждения.....	6
2.2 Руководство по сборке.....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	8
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	10

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик насадок на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10527L; 10545; 10540.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Насадки на унитаз, увеличивая высоту санитарного устройства, облегчают пользование туалетом людям после перенесенных травм, операций, а также инвалидам разных категорий. Насадки увеличивают высоту унитаза, что способствует оптимальному положению пациента и обеспечивают ему комфорт. Насадки выполнены из белого прочного и легко моющегося полиэтилена. Они подходят на унитазы любой формы и не требуют специального инструмента.

1.2 Технические характеристики

Модель 10528.

- Насадка на унитаз с гигиеническим вырезом
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- Регулируемый фиксатор по внутренней плоскости унитаза
- Складная конструкция рамы
- Вес: 2 кг.
- Макс. нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10528А.

- Насадка на унитаз с гигиеническим вырезом
- Быстросъемные алюминиевые поручни с мягкими валиками
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- Регулируемый фиксатор по внутренней плоскости унитаза
- Вес: 2,7 кг.
- Макс. нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10528А/Т.

- Насадка на унитаз с гигиеническим вырезом
- Съемные алюминиевые поручни с мягкими валиками
- Увеличенное расстояние между поручнями
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- 3 регулирующих фиксатора по внешней плоскости унитаза
- Вес: 1,4 кг.
- Макс. нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10527L.

- Насадка на унитаз с гигиеническим вырезом и крышкой
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- 3 регулирующих фиксатора по внешней плоскости унитаза
- Вес: 1,4 кг.
- Макс. нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10545.

- Насадка на унитаз
- Регулируемая высота сиденья
- Защита от брызг
- Материал: гигиенический, ударопрочный пластик
- 5 регулирующих по высоте фиксаторов на обод стандартного унитаза
- Вес: 1,6 кг.
- Макс. нагрузка: 115 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

Модель 10540.

- Насадка на унитаз
- Возможность регулировки расстояния между поручнями
- Регулируемая высота поручней
- Поручни изготовлены из анодированного алюминия
- Поручни оснащены резиновыми противоскользящими наконечниками
- Пластина-фиксатор на стандартный унитаз
- Вес: 4 кг.
- Макс. нагрузка: 100 кг.
- Производство: Тайвань (Китай)
- Гарантия: 6 месяцев

1.3 Упаковка

В комплектации: Насадка на унитаз, поручни (кроме моделей 10545, 10527L, 10528), винты (только с моделью 10528A/T), крепежные элементы (только с моделью 10540).

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.

2.2 Руководство по сборке.

Модель 10540.

Внимание: измерьте параметры Вашего унитаза и отрегулируйте ножки по ширине так, чтобы они подходили к Вашему унитазу.

Для установки поручней снимите с унитаза сиденье с крышкой.

1) Деталь №1 зафиксируйте к корпусу унитаза крепежными элементами сиденья.



Деталь №1

2) Посредством кнопочного замка на ножках совместите поручни с отверстиями детали №1 до щелчка, два положения замка позволяют регулировать ширину поручней.

3) Посредством кнопочного замка на телескопических ножках отрегулируйте высоту поручней.

Модель 10528А/Т.

Прикрепите поручни к нижней части насадки на туалет с помощью винтов.

Модель 10528А.

Посредством кнопочного замка совместите поручни с отверстиями насадки на туалет до щелчка.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте изделие на наличие трещин и поломов.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Насадки на унитаз 10528; 10528A; 10528A/T; 10527L; 10545; 10540.

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

ИНН 7734197385

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6

тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru

(адрес, телефон, факс)

в лице

Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели

(Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что

Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами - НАСАДКИ НА УНИТАЗ: АРТ. 10527, АРТ. 10527L, АРТ. 10528, АРТ. 10528A, АРТ. 10528A/T, АРТ. 10529, АРТ. 10530, АРТ. 10540, АРТ. 10545

Изготовитель продукции: VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШЛ ЛТД), 8TH FLOOR, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien, Тайвань (Китай)

ЗАВОДЫ:

- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS CO. LTD., №152 Wu Fu Road, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (КИТАЙ)
- ST. YORK ENTERPRISE CO., LTD, №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (КИТАЙ)
- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, NEW CITY DISTRICT. DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (КИТАЙ)
- Nova Orthopedic & Rehabilitation Appliance, Inc., №1096, Feng Chou Road, Shi Chou Village, Sheng Kang Township, Taichung Country, Taiwan, China.

Код ОК 005 (ОКП) 94 5100 Код ТН ВЭД СНГ 3922 20 000 0

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 51632-2000

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании

протоколов испытаний: № 1700.014 от 20.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33);

№ 1131/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)

регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09869 от 21.06.2011

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации

09.06.2014

Декларация о соответствии действительна до 08.06.2019



(Подпись)

С.П.Бадалян

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.

141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. (495) 7812587, факс (495) 7812588, e-mail: oc@anogremc.ru

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

№ РОСС TW.МЕ77.Д00346 от 09.06.2014

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



(Подпись)

Д.А.Дружнин

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок