

При отсутствии в паспорте даты продажи или печати торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты изготовления.

При возникновении поломки в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует сервисный ремонт. Рециркулятор принимается на гарантийный ремонт только с предъявлением паспорта на прибор.

Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные нарушением правил эксплуатации, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы, в том числе:

- механическим повреждением изделия в результате удара либо применения чрезвычайной силы;
- повреждением изделия в результате воздействия горячих предметов или жидкостей;
- любым посторонним вмешательством в конструкцию изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рециркулятор «СФЕРА 912/65W» изготовлен и принят в полном соответствии протокола испытаний №ГТД/072020/7376 и признан годным для эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рециркулятор - 1 шт.
- Пульт ДУ - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Паспорт совмещен с гарантийным талоном - 1 шт.

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Лампы	1 шт. TUV 38 W, 2G11 без озона
Площадь покрытия	до 45 м ²
Срок службы ламп	9000 часов
Степень обеззараживания	до 99,9%
Общая мощность	65 Вт
Напряжение	220 В
Частота питающего напряжения	50 Гц
Тип эпра	электронный
Производительность	90 м ³ /час
Габариты	595 x 595 x 80 мм
Уровень шума	23 дБ
Цвет корпуса	белый
Вес	не более 6 кг
Вариант эксплуатации	потолочный, настенный

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ

-  общеобразовательных учреждений
-  общественных учреждений
-  административно-офисных помещений
-  медицинских учреждений
-  торговых залов ТРЦ
-  супермаркетов и гипермаркетов
-  салонов красоты и парикмахерских
-  фитнес-центров

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Рециркулятор «СФЕРА 912/65W»

Наименование товара

Название и адрес продавца

Дата продажи

Подпись продавца

Печать

ПАСПОРТ

Рециркулятор «СФЕРА 912/65W»

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Zhangsham Guzhen Universal lighting Fittings Factory.
Местонахождение и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, Room W10, Building 3, Guyi Accessories city, Guyi station, Guzhen Zhongshan, Guangdong.



УБИВАЕТ ДО 99,9%
ВСЕХ БАКТЕРИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство рециркуляционного типа с УФ-лампой «СФЕРА 912/65W» для обеззараживания воздушной среды разработаны для работы в помещениях с постоянным присутствием людей.

Рециркуляционный модуль обеззараживания воздуха, оснащенный принудительной системой вентиляции и бактерицидной УФ-лампой, производительность 90 м³/час.

Эффективная борьба с вирусами в офисах и общественных помещениях.

Обеззараживание воздуха происходит благодаря работе газоразрядной бактерицидной УФ-лампе, с длиной волны ультрафиолетового излучения 254 нм без выделения озона, которая способна очистить воздух от болезнетворных бактерий, вирусов и грибов. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254 нм хорошо проникает сквозь стенку клетки микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов.


Рециркулятор может применяться в административно-офисных помещений, общественных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских учреждений, торговых залов ТРЦ, супермаркетов и гипермаркетов, салонов красоты, парикмахерских салонов, фитнес-центров.

Рециркулятор не является медицинским изделием.

БЕСШУМНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Воздух из помещения прокачивается через рециркуляционный модуль обеззараживания благодаря установленному внутри бесшумного и мощного вентилятора. Система прокачки воздуха устроена таким образом, чтобы потоки не смешивались, согла устройства направлены в разные стороны, за счет такого расположения достигается оптимальная циркуляция воздуха в пространстве под устройством, позволяющая постоянно поддерживать чистоту воздушной атмосферы в помещении.

Одного устройства достаточно для поддержания чистой атмосферы в помещении площадью до 45 м².

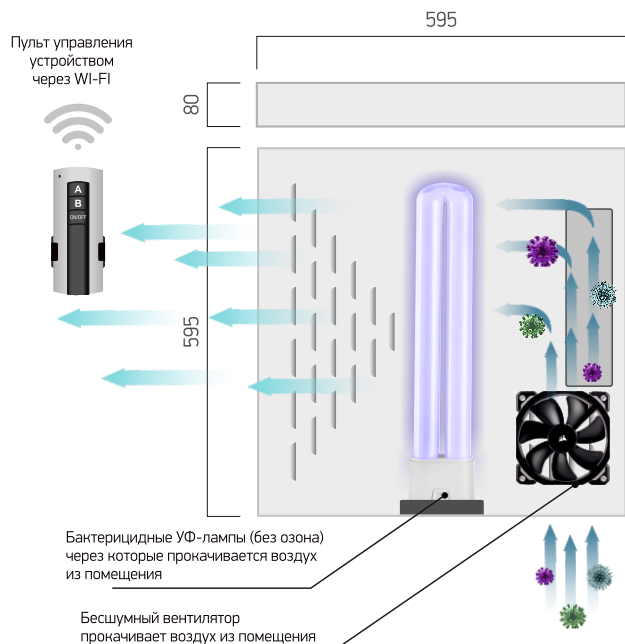

ПРЕИМУЩЕСТВА



Эффективное решение в борьбе с вирусами



Режим работы в присутствии людей



УФ-лампы без образования озона



Встроенный модуль для обеззараживания воздуха



Безопасно для зрения



Высокая эффективность

УЛЬТРАФИОЛЕТ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Бактерицидное устройство ультрафиолетового излучения установлена в изолированном модуле таким образом, чтобы их не было видно находящимся в зоне действия устройства людям. УФ бактерицидная лампа мощностью 38 Вт установлена в обеззараживающем модуле и надежно скрыты от глаз людей.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность обеззараживающего модуля с активной системой вентиляции составляет примерно 90 м³/час, что вполне достаточно для эффективного очищение воздушной среды от вирусов в помещения площадью до 45 м².

Устройство СФЕРА 912/65W содержит светодиодный модуль, который обладает высокой световой эффективностью, более 110 лм/Вт. Цветовая температура светового потока 4000 К – нейтрально-белый свет.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Устройство устанавливается в стандартные ячейки потолка «Армстронг» размером 600x600 мм, взамен ранее установленных светильников, либо в дополнение к ним.

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

Вы получаете готовый к установке и работе световой прибор с функцией обеззараживания, Вам ничего больше не потребуется, кроме как подключить светильник к рабочей сети с напряжением 220 В.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу светильника производить только при отключенной сети питания квалифицированными специалистами. Запрещена доработка светильника без согласования с разработчиком. Запрещена эксплуатация светильника в разобранном виде, или с повреждениями плафона изоляцией проводов и мест электрических соединений. Запрещена эксплуатация в пожароопасных и взрывоопасных зонах светильников без соответствующих данным зонам сертификатов пожарной безопасности и взрывозащиты. В случае нарушения целостности колб бактерицидных ламп должна быть проведена тщательная демеркуризация помещения в соответствии с требованиями и правилами, действующими на территории страны, где используется светильник.

Сведения об утилизации Пластмассовые детали передаются на предприятия по переработке пластмасс. Металлические детали сортируются по группам и направляются на предприятия вторцветмета и вторчермета. Электронные компоненты направляются на предприятие по их переработке. Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с требованиями и правилами, действующими на территории страны, где используется прибор.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор в упаковке изготовителя должен храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 оС до 40 оС и относительной влажности не более 80% при 25 оС при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных компонентов.

Прибор в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом крытых транспортных средств.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Рециркулятор СФЕРА 912/65W» требованиям технических условий ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.